

LIVING basics

Une marque de **Shopper+**   *Fièrement canadienne*

Manuel d'instructions du déambulateur pliable à 4 roues

SKU:LB-FSD-FST935A



Avis de Sécurité: Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement et entièrement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation.

Précautions importantes: Avant d'utiliser votre déambulateur, vous devez lire et comprendre entièrement toutes les consignes de sécurité suivantes. Ce produit est une aide à la mobilité personnelle. Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves à l'utilisateur ou à d'autres personnes.

À PROPOS DU PRODUIT




- 1: Poignée
- 2: Poignée de frein
- 3: Dossier
- 4: Cadre principal
- 5: Siège rabattable
- 6: Porte-gobelet
- 7: Sac de rangement
- 8: Sangle de pliage
- 9: Porte-canne
- 10: Roue arrière
- 11: Roue avant

Guide d'assemblage du produit



1: Ouvrez l'emballage et retirez soigneusement tous les composants.

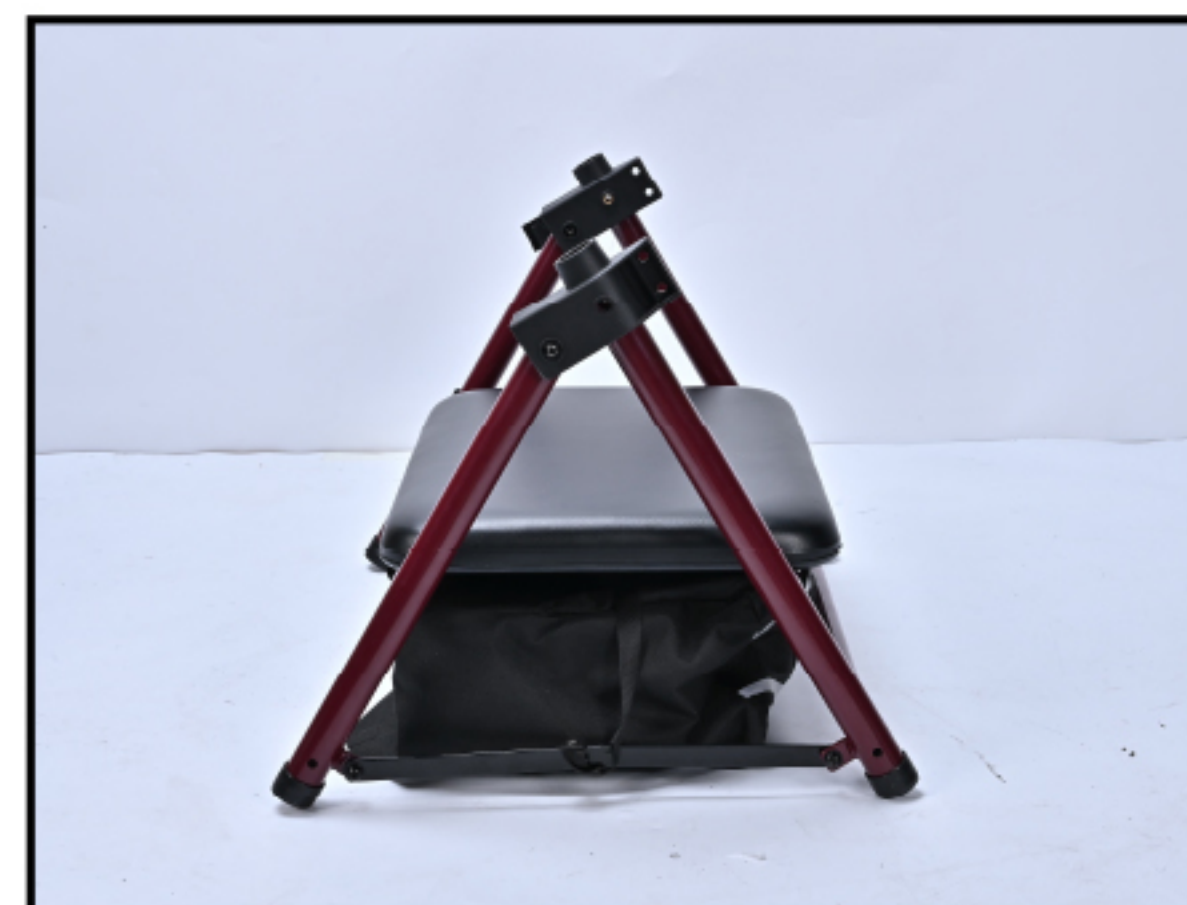

2: Dépliez le cadre principal : Déployez-le et aplatissez le siège comme indiqué sur l'illustration ci-dessus. Assurez-vous que le cadre est complètement déployé.



3: Veuillez utiliser les vis indiquées ci-dessus pour l'assemblage.



4: Insérez la roue avant (position étiquetée 1) dans le cadre principal (position étiquetée 1). Alignez les trous, puis insérez la vis n° 2 dans l'ouverture hexagonale (assurez-vous que la vis s'aligne avec le trou hexagonal). Ajoutez la rondelle et l'écrou à molette (le côté concave de la rondelle doit faire face au cadre principal), puis serrez fermement.



5: Insérez la roue avant (position étiquetée 2) dans le cadre principal (position étiquetée 2). Alignez les trous, puis insérez la vis n° 2 dans l'ouverture hexagonale (assurez-vous que la vis s'aligne avec le trou hexagonal). Ajoutez la rondelle et l'écrou à molette (le côté concave de la rondelle doit faire face au cadre principal), puis serrez fermement.



6: Insérez la roue arrière (position étiquetée 3) dans le cadre principal (position étiquetée 3). Alignez les trous, puis insérez la vis n° 2 dans l'ouverture hexagonale (assurez-vous que la vis s'aligne avec le trou hexagonal). Ajoutez la rondelle et l'écrou à molette (le côté concave de la rondelle doit faire face au cadre principal), puis serrez fermement.



7: Insérez la roue arrière (position étiquetée 4) dans le cadre principal (position étiquetée 4). Alignez les trous, puis insérez la vis n° 2 dans l'ouverture hexagonale (assurez-vous que la vis s'aligne avec le trou hexagonal). Ajoutez la rondelle et l'écrou à molette (le côté concave de la rondelle doit faire face au cadre principal), puis serrez fermement.




8: Insérez chaque poignée dans le cadre principal (faites attention à l'orientation des poignées). Alignez les trous, puis insérez la vis n° 1 et serrez fermement.



9: Fixer les câbles de frein : Endenchez les deux câbles de frein dans leurs clips respectifs.

Remarque importante : Assurez-vous que toutes les roues pivotantes sont réglées au même niveau de hauteur.

Product Assembly Guide

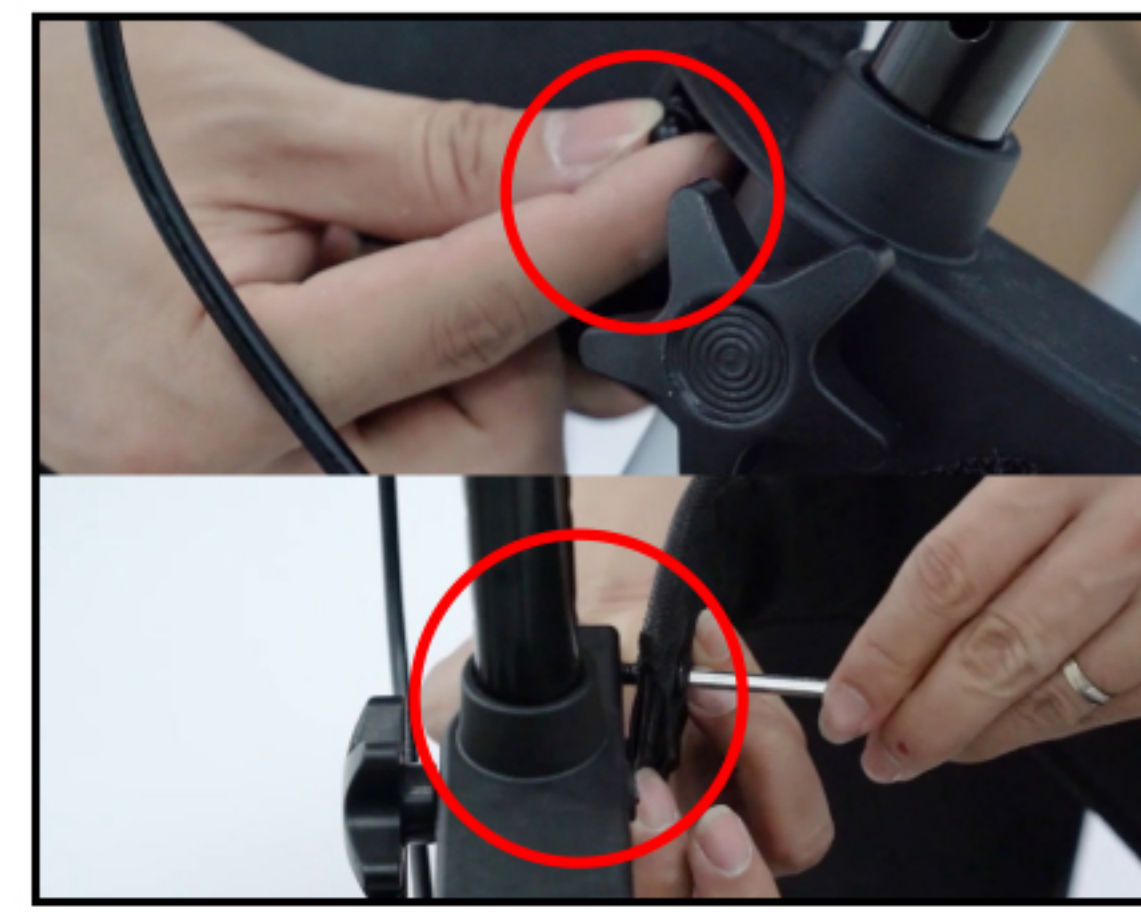

10: Installer le dossier : Insérez deux (2) vis n° 3 dans les trous supérieur et inférieur du dossier, comme indiqué sur l'illustration.

11: Installer le dossier. De l'autre côté, placez les écrous, puis utilisez la clé en L pour serrer les vis, comme indiqué sur l'illustration. (Répétez les étapes 10 et 11 pour installer l'autre côté.)

Fixer le porte-canne : Installez le plateau porte-canne sur le tube de la jambe de la roue arrière à la position étiquetée 4. Assurez-vous qu'il s'enclenche solidement en place et qu'il ne se détachera pas.

Fixer la pochette porte-gobelet : Installez la pochette porte-gobelet sur l'autre côté du cadre. Ajustez sa position, puis fixez fermement les sangles Velcro, en vous assurant que la pochette porte-gobelet est bien sécurisée.

Pliage du déambulateur



1. Relever le siège : Relevez le siège.

2. Tirer la sangle de pliage : Tirez la sangle d'aide au pliage vers le haut.

3. Pliage terminé : Le déambulateur est maintenant plié.

Précautions de sécurité

- 1 : Avant chaque utilisation, assurez-vous que le déambulateur est complètement ouvert, que le siège est abaissé et que la barre de pliage sous le siège est verrouillée en position basse.
- 2 : Vérifiez que les deux boutons de réglage de la hauteur sont bien serrés et réglés à la même hauteur. Testez la stabilité du déambulateur avant d'appuyer de tout votre poids sur les poignées.

3 : Testez toujours les freins (verrous à boucle) avant utilisation. Lorsque les freins sont serrés, la barre de verrouillage des roues arrière doit les empêcher de tourner. Si les roues tournent alors que les freins sont serrés, n'utilisez pas le déambulateur. Contactez votre revendeur pour un réglage. Une fois les freins desserrés, les roues doivent tourner librement.

4 : Serrez toujours les freins avant de vous asseoir. N'utilisez pas le siège sur une pente ou un sol irrégulier.

5 : Remplacez les pneus s'ils sont très usés ou endommagés.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce déambulateur est uniquement une aide à la marche. Il ne doit PAS être utilisé comme moyen de transport. NE LAISSEZ PERSONNE vous pousser lorsque vous êtes assis sur le déambulateur.

Utilisation des Freins

Important : Toujours activer et relâcher les freins des deux côtés simultanément.

1. Pour Ralentir ou s'Arrêter Temporairement (Frein de Service)

Tirez doucement les deux poignées de frein vers le haut, en votre direction. Plus vous tirez, plus le déambulateur ralentira.

2. Pour Verrouiller les Freins (Frein de Stationnement)

Appuyez fermement sur les deux poignées de frein avec vos paumes jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » qui confirme leur position verrouillée. Vérifiez toujours que les deux freins sont verrouillés avant de vous asseoir.

3. Pour Déverrouiller les Freins


Tirez les deux poignées de frein vers le haut pour les débloquer et les remettre dans leur position initiale (neutre).



Instructions pour régler le système de frein à main

Informations de sécurité importantes

Le système de frein installé sur ce déambulateur répond à toutes les normes de qualité et de sécurité requises. Pour des performances optimales, les freins ont été pré-réglés en usine. Cependant, des réglages peuvent être nécessaires pour s'adapter à vos préférences personnelles ou pour compenser l'usure normale. Vérifiez régulièrement le fonctionnement des freins et ajustez-les si nécessaire en suivant les instructions ci-dessous.

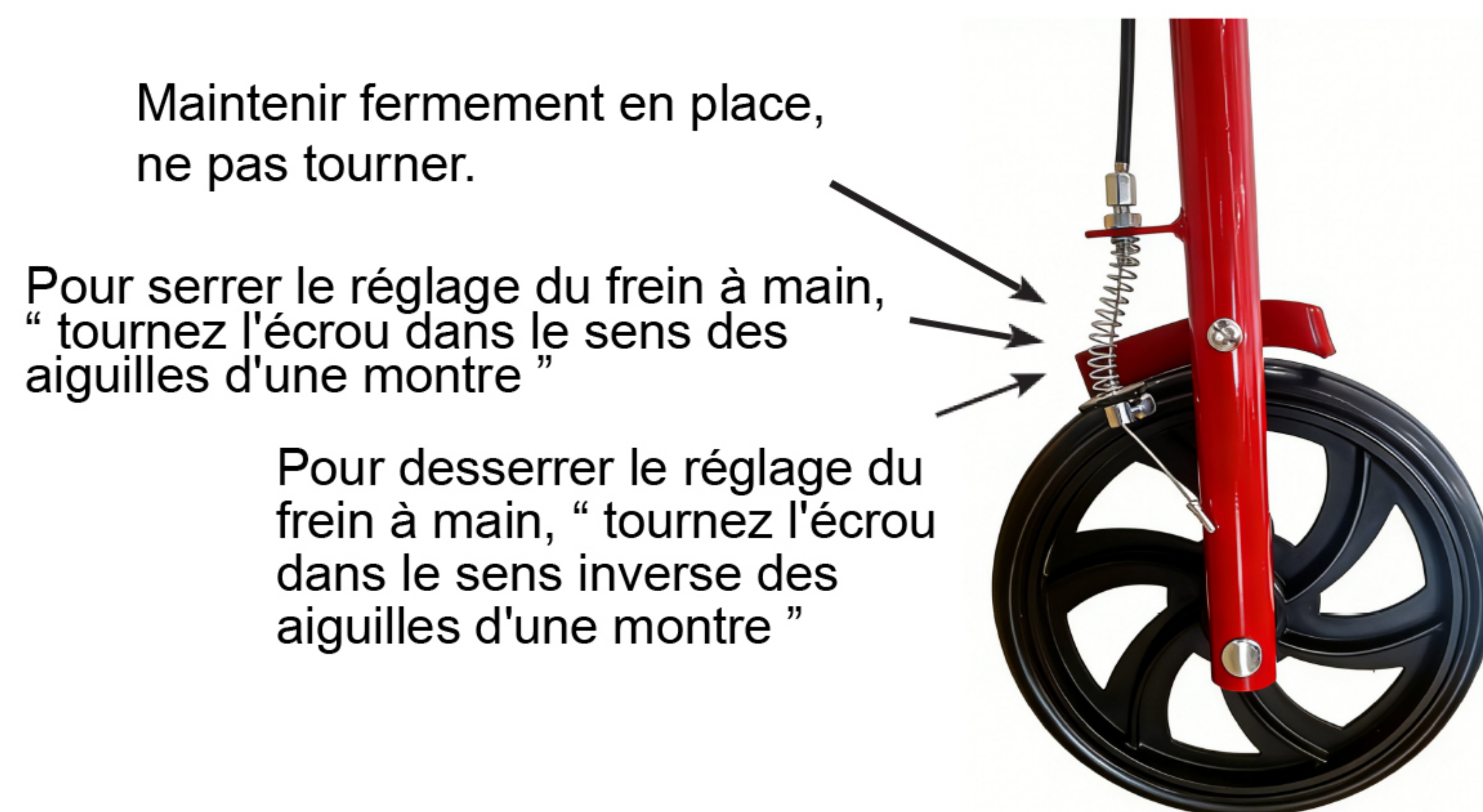

Consignes générales de sécurité

Capacité de charge: NE PAS dépasser la capacité de charge maximale de l'utilisateur ni la capacité de charge maximale du sac de rangement, comme indiqué.

Ce produit n'est pas un dispositif de transport : Ce produit n'est PAS un fauteuil roulant. Ne laissez JAMAIS quelqu'un vous pousser lorsque vous êtes assis dans le déambulateur. NE PAS l'utiliser pour transporter des personnes ou des objets lourds.

Posture correcte : Marchez toujours à l'intérieur du cadre du déambulateur, et non derrière. Maintenez votre corps centré entre les poignées pour assurer la stabilité.

Maintien des deux mains sur les poignées : Gardez les deux mains sur les poignées en permanence pour garder le contrôle et accéder aux freins.

Ne pas surcharger : NE PAS suspendre d'objets lourds, de sacs à main ou de sacs aux poignées ou sur le côté du cadre. Cela pourrait rendre le déambulateur instable et le faire basculer.

Attention à l'environnement : Soyez attentif aux dangers potentiels au sol, tels que les bords de tapis, les cordons électriques, les seuils et les déversements.

Sécurité des freins et de l'assise

TOUJOURS VERROUILLER LES FREINS AVANT DE S'ASSEOIR : Avant de vous asseoir sur le siège, serrez les freins de stationnement en appuyant fermement sur les deux leviers jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en position verrouillée. Vérifiez que le déambulateur ne bouge pas.

Asseyez-vous en toute sécurité : Retournez-vous et reculez jusqu'au siège. Utilisez les poignées comme support et abaissez-vous lentement au centre du siège.

Ne pas se propulser : NE JAMAIS tenter de déplacer le déambulateur en le déplaçant avec les pieds en position assise.

Maintenir l'équilibre en position assise : NE PAS se pencher en avant ou sur le côté pour atteindre des objets en position assise, car cela pourrait entraîner une perte d'équilibre et une chute.

Restrictions liées au terrain et à l'environnement

NE JAMAIS utiliser dans des escaliers ou des escalators : Il est strictement interdit d'utiliser ce déambulateur dans des escaliers, des escalators ou des trottoirs roulants.

Prudence sur les pentes : Soyez extrêmement prudent sur les rampes, les pentes et les descentes. Utilisez les freins pour contrôler votre vitesse en descente.

Évitez les surfaces dangereuses : Soyez prudent sur les surfaces mouillées, glissantes ou verglacées. Évitez d'utiliser le déambulateur sur un terrain accidenté, du gravier, des tapis épais ou un sol meuble où les roues peuvent se coincer.

Entretien et maintenance

Nettoyage régulier : Nettoyez régulièrement votre déambulateur avec un chiffon humide et un nettoyeur doux non abrasif. Séchez soigneusement.

Vérification des fixations : Vérifiez mensuellement le serrage de toutes les vis, écrous et boulons.

Réparation par un professionnel : Si une pièce ou un composant, en particulier les freins et les roues, est endommagé, usé ou desserré, cessez immédiatement d'utiliser le déambulateur. Contactez votre revendeur ou un professionnel qualifié pour toute réparation. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.

Nom du produit : Rollator pliable

Modèle: LB-FSD-FST935A

Date de fabrication: 202603

Capacité de poids maximale: 300 lbs/136 kg

Propriétaire de la marque: Shopper+ INC

Adresse du propriétaire de la marque: 2110 52E AV, LACHINE, QUEBEC, H8T 2Y3, MONTREAL, CANADA

Email: support@shopperplus.com

Téléphone: 514-631-5216

Fabricant:

Adresse du fabricant: